

MINI-INKUBATOR

m/ power adaptor



MINI-INKUBATOR INDEHOLDER

- 1 stk. mini-inkubator
- 1 stk. power adaptor

Passer til

- BACT Gram neg/pos, varenummer 201

Mini-inkubatoren kan rumme 1 stk BACT testbrik (*ikke inkluderet*)

Mini-inkubatoren sørger for at styre konditionerne omkring BACT testbrikken ved at opvarme til ca. 37 graders Celcius (kropstemperatur), og en opformering af de tilstedeværende bakterier i mælkeprøven anbragt i BACT testbrikken vil finde sted.

Mini-inkubatoren tager ikke meget plads. En blinkende lysindikator viser, at strømmen er tilsluttet, og inkubatoren er i gang. Inkubatoren fungerer ved stuetemperatur (17-35 graders Celcius), og direkte sollys bør undgås.



MINI-INKUBATOR

m/ power adaptor

ANVENDELSE

Udtagning af mælkeprøve




Applikation af mælkeprøve



Mini-inkubator



Aflæsning

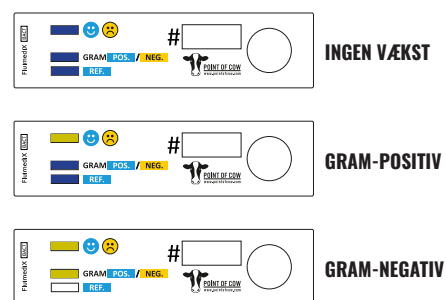

PRODUKT FORDELE

- Støtteværktøj til tilvalg/fravalg af behandling af mild yverbetændelse
- Opfølgning på om behandling har effekt
- Nem at anvende, ingen træning nødvendig
- Hurtigt svar inden for 16 timer

SPECIFIKATIONER

Varenummer: 301,

Mini-inkubator m/ power adapter

Mini-inkubator m/ power adapter 1 stk

Kapacitet:	1 stk BACT
Dimensioner (B, L, H):	31x 119.3 x 20.8mm
Vægt:	96g / 150 g w/adapter
Strømtilslutning:	230V
Driftspænding:	5V DC
Effektforbrug:	Op til 5W
Omgivelsestemperatur:	17-35 graders Celcius. Må ikke anvendes i direkte sollys