


QUICK GUIDE

BACT GRAM NEG/POS -MASTITISTEST

1

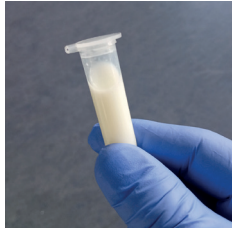

Prøverøret fyldes
(Rene hænder og rent yver!!)

2



Testpipetten fyldes
("Boblen" trykkes helt sammen)

3



Testbrikken fyldes
(Pipetten tømmes helt)

4




Testen lægges i inkubator eller
varmeskab i 14-16 timer

37°




BACT - inden fyldning

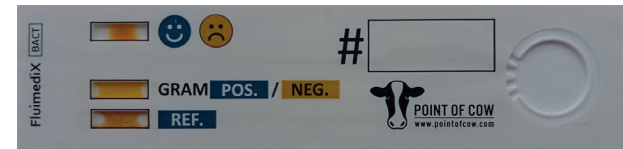


BACT - efter inkubation


Ingen vækst: Ingen penicillin

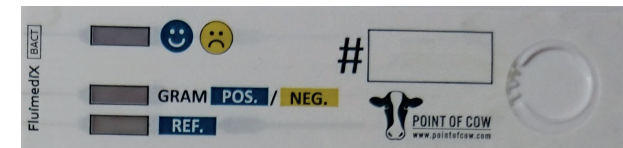

GRAM-negativ: Ingen penicillin

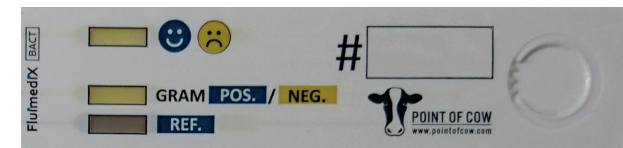

GRAM-positiv: Penicillin-behandling

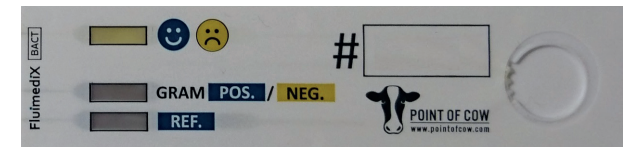

RESULTAT



Info: pointofcow.com, tlf. +45 93 94 98 86